

	AUSFÜHRUNG	GP03AW3201
	Korrekte Anwendung einer Hygienemaske	Seite 1 von 1

	Maske anziehen
	Hände mit Seife und Wasser oder mit einem Desinfektionsmittel waschen
	Farbige Seite nach aussen, Metallteil nach oben
	Maske zum Vorformen etwas auseinanderziehen
	Maske vor Mund und Nase halten, elastische Schleifen hinter dem Ohr befestigen
	Metallstreifen unter dem Nasenbein andrücken, um die Form an die Nase anzupassen
	Unterseite der Maske bis über das Kinn nach unten ziehen. Maske nicht mehr berühren, sonst Hände waschen oder desinfizieren
	Maske ausziehen
	Maske an den elastischen Schlaufen hinter den Ohren greifen und von Mund und Nase entfernen
	Maske zur Aufbewahrung in ein Papier-Umschlag verstauen (nur an den Bändern festhalten)
	acht Stunden getragene, nasse oder schmutzige Masken wegwerfen
	Hände mit Seife und Wasser waschen oder mit einem Desinfektionsmittel desinfizieren

Datum / Ersteller	Datum / Prüfer	Datum / Freigabe
07.05.2020 / NBE	07.05.2020 / JEG	08.05.2020 / NBÄ